


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Analýza střevního mikrobiomu

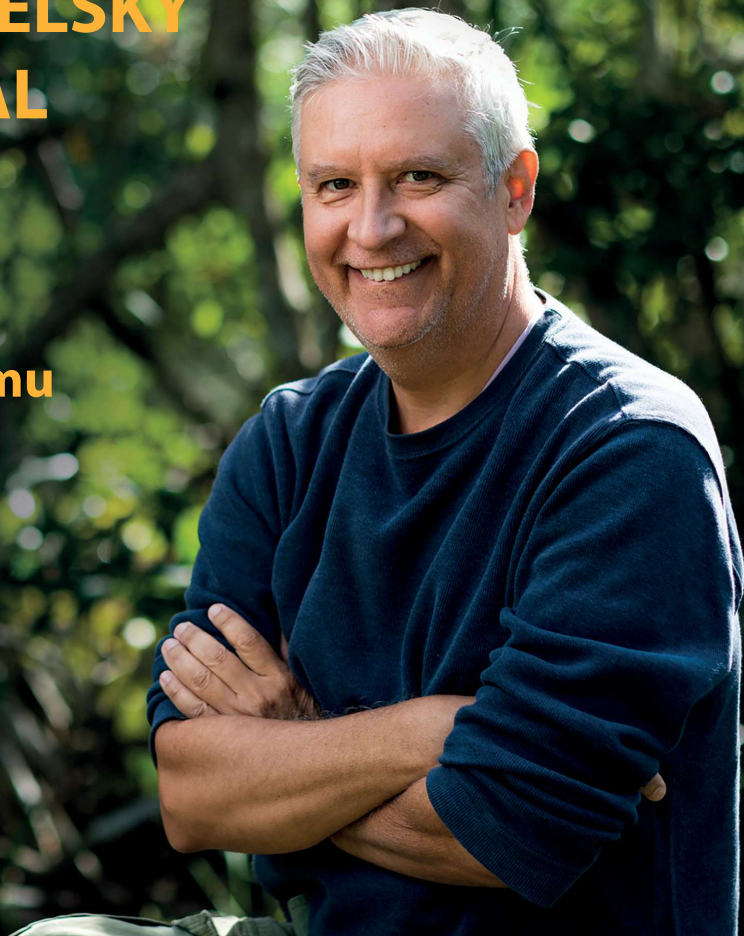

**Doručení
zásilky**



**Odběr
v pohodlí
domova**



**Registrace
na webu
a aktivace test sady**



**Odeslání
zásilky**



**Analýza
mikrobiomu**



**Mikrobiom
report**

Připravili jsme jednoduchý návod, jak odebrat vzorek a následně jako zpětnou zásilku zaslat přes GLS. Samotný odběr vzorku je jednoduchý a nezabere vám více než 10 minut.

Obsah zásilky



Registrace testované osoby a aktivace odběrového setu

- Udělejte registraci testované osoby na webových stránkách www.biome4future.com/muj-ucet/
- V záložce Analýzy klikněte na tlačítko “Aktivace odběrového setu”
- **Přepište unikátní ID kód ze samolepky na zkumavce** a přiřadte ji konkrétní testované osobě
- **Vyplňte dotazník**
- **Přečtěte si podmínky Uživatelské sekce** a souhlas nám potvrďte

 Potřebujete pomoci?
Volejte + 420 776 279 676



Aktivujte svoji testovací sadu

Přepište unikátní šestimístný KÓD ze ŠTÍTKU na zkumavce

 DEP-
-001-
-649

- -

[Pokračovat](#)

Odběr a odeslání vzorku

1. Připravte si vše potřebné.

Zkontrolujte dle obrázku výše.

2. Doporučujeme se **před odběrem vymočit**, aby nedošlo ke znehodnocení stolice močí.

3. Připravte si toaletu.

Papírové podložky (2 ks), které slouží k záchytu stolice přilepte na mísu.



4. **Nasadte si rukavice**, které jsou součástí zásilky.

5. **Připravte si zkumavku**, pootočením vytáhněte tyčinku.

6. **Konec tyčinky zasuňte do stolice** (stačí pouze nepatrně tak, aby koncovka tyčinky byla mokrá, a aby se vám tyčinka se vzorkem bezpečně podařila zasunout zpět do zkumavky).

7. **Tyčinku ihned po odběru zasuňte do původní zkumavky** (nikde nepokládejte, zabráníte tak kontaminaci vzorku).

8. **Uzávěr zkumavky přilepte dodanou samolepkou.**

9. **Zkumavku dejte do bílého plastového zip obalu**, vytlačte vzduch a uzavřete.

10. **Složte napůl a vložte do bublinkové transportní obálky.**

Na obálku nalepte GLS přepravní štítek pro zpětnou zásilku, který jste od nás dostali v původní zásilce.

Předejte v libovolném výdejním místě GLS.

ZÁSILKU ODEŠLETE IDEÁLNĚ V DEN ODBĚRU.

Co dál?

Nyní už je vše na nás.
Ve lhůtě 4-8 týdnů
od nás obdržíte
výsledky analýzy ve formě
přehledného mikrobiom
reportu.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Zavolejte nám na telefon

776 279 676

Jsme vám k dispozici, rádi vám pomůžeme.

info@biome4future.com

www.biome4future.com